

Fecha Recepción: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
ORDEN DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-1308B** Fecha Inicio: **11/8/21 8:25** Fecha Fin: **11/8/21 11:25**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	SI REPUESTO O CERRADO
	X		Switch Encendido	7		X

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	GRUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	VALVE	CODIGO DE BARRAS		RUEBAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANA (SI/NO)		
	18008	5.991.6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Mnb Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min** Generó Alarma: No Sí Cueli:

2. RUIDO EXTRAÑO: Sí No 3. ESTADO DE MANGUENAS: Buena Mala A. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

4. CÁVOS IDENTIFICADOS: _____

5. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena F. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento: _____

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma (L1 y alarma LED amarilla y L1 - L2 - E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión alarma electrónica	OK
5	Activación de alarma de alto	Check el manguero de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	GRUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	VALVE	CODIGO DE BARRAS		RUEBAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANA		
	18008	6091.3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	FORMA MANTENIMIENTO