

OX Pro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO		
Fecha Recepción		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		Nº. Orden		
Código Equipo: NN-2933 Fecha Inicio: 12/7/21 11:20 Fecha Fin: 12/9/21 10:30								
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLUGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	DAÑO	COBREADO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	REPORTE	
						\$	No	
						\$	No	
						\$	No	
						\$	No	
						\$	No	
						\$	No	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE								
ÁREA DE MANTENIMIENTO								
Ecu. Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		RELLenos		CÓDIGO DE BARRAS		
INCRÓMETRO	PRENSIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	DESCONEXIÓN	PIA	"FLUGA A V"	RUELAS	
403	6.5	975	SI	SI	SI	E5	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		Cual?		
		90 mins		No		X		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		
		X		Buenas		Bueno X		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Con Sobresobrecalentado		
				Bueno		X		
SET DE PRUEBAS								
Nº.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila					4.8V	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte					Fuerte	
6	Otros							
7	Otros							
Descripción del diagnóstico identificado								
REPUESOS USADOS								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.			
PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS EN COMERCIALIZACIÓN								
Nº.	Prueba / Estrat. / Descripción	Descripción					Resultado	
1	Fuga = 0 (Carga Neumática)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E5)					E5	
2	Fuga Visual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1, L2, E5)					LO	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarmas sonoras					OK	
4	Desconexión tarjete de fuga	Desconexión línea eléctrica					OK	
5	Activación de alarma de alarma	Obtención manguera de salida de aire de compresor					OK	
6	Otros							
7	Otros							
8	Otros							
OBSERVACIONES								
FIRMA MANTENIMIENTO								