



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Formato:

Código: OAD-MAN-PR-008

Versión: 1 Fecha Actualización: 03/06/2016

Página 1 de 2

Fecha Recepción	Remisión a	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
-----------------	------------	-----------------------	-----------

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
Código Equipo	Fecha Inico	Fecha Fin	No. Orden
AN-200B3	10/06/21	12:59	10/06/21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
					14:31

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

### AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)	RELLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)				
23247	6296.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma	NO	SI	CUAT							
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	NO	Males	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	NO	SI					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUENAS			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento							

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro		
7	Otro		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cable Rajado)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonido (LED Rojo a LED amarillo y (LI-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)	RELLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)			
23247	6296.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	Funciona Correctamente

INSTITUCIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO  
 PROFESIONISTA DE ENFERMERIA  
 CANTON DE LA ALFARERIA  
 CANTON REALIZADO