

OXIPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES					FORMATO	
		Codigo		GAC-MAN-FR-008				
		Versión: 1		Fecha Actualización: 02/08/2010				
				Página 1 de 2				
Fecha Remisión		Remisión #		Acción Mantenimiento		No. Orden		
IDENTIFICACION DEL EQUIPO								
Codigo Equipo	NW-1385B			Fecha Inicia	9:11	Fecha Fin		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	DAÑO	CONSEJO	CONDICION	CANTIDAD	REPORTE	REPIERTE	REPARADO	
							SI NO	
							SI NO	
							SI NO	
							SI NO	
							SI NO	
							SI NO	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE								
En Mantenimiento								
HORÓMETRO	PRESIÓN	CONDENS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES	
0-100	0-100	0-100	0-100	Desconexión	Pila	"Fijo a 0"		
100	100	100	100	0-100	0-100	0-100		
100	62	60				65		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		15 min	Generó Alarma	No	Si	X	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Mala		
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento		
No.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila					SI	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo						
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte						
6	Otras:							
7	Otras:							
Descripción del diagnóstico identificado								
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT			
	1 arm 2	2						
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado	
1	Fijo + 0 (Claro Fijómetro)	Se verifica indicación de alarma (LL-L0-E2)						
2	Fijo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E2)						
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora						
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica						
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de línea de compresor						
6	Otras:							
7	Otras:							
8	Otras:							
En Mantenimiento								
HORÓMETRO	PRESIÓN	CONDENS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES	
0-100	0-100	0-100	0-100	Desconexión	Pila	"Fijo a 0"		
100	62	95.3		0-100	0-100	0-100		
100								
		PRUEBA MANTENIMIENTO						