

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO COD-MAN-FR-008 Versión 1 Fecha Actualización: 03/03/2016 Página 1 de 2	
Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento				No. Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo	AN-901B		Fecha Inicio	15/07/21	7:40	Fecha Fin	15/07/21 9:12
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA			SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	
FECHA FIN AISLAMIENTO							
DETALLE DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR PARTE DEL TECNICO							
FALLA	DAÑO	QUANTIDAD	CANTIDAD	RECURSOS	RECURSOS	AVISADO	AVISADO
	Switch encendido		1			SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES		
HORÓMETRO	PRENSION	CARGA	FLUJOMETRO	Desconexión (20-30)	Pila (20-30)	"Flujo a 2" (20-30)	SEÑAL (20-30)	FILTRO (20-30)	BASC (20-30)	CÓDIGO DE BARRAS (20-30)		RUEDAS (20-30)		Mont. preventivo	
1000	6.2	92.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		NO		SI		Cód?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		5:		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo e fuerte	fuerte
6	Otro		
7	Otro		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 2 (Cierre Rojo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Cobrir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES		
HORÓMETRO	PRENSION	CARGA	FLUJOMETRO	Desconexión (20-30)	Pila (20-30)	"Flujo a 2" (20-30)	SEÑAL (20-30)	FILTRO (20-30)	BASC (20-30)	CÓDIGO DE BARRAS (20-30)		RUEDAS (20-30)		Funciono correctamente Wilmer G.	
1000	6.2	92.3	SI	SI	SI	OK	SI	SI	NO	SI	SI				
Firma Mantenimiento															