

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO							
Fecha Realización		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		Código	040-1045-FR-03						
Código Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin		Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019						
M-499B		19/01/22 7:32		19/01/22 9:13		Página 1 de 2							
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAZA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO							
VALOR BANDA PLANIFICADA		VALOR BANDA PLANIFICADA		VALOR BANDA PLANIFICADA		VALOR BANDA PLANIFICADA							
En Mantenimiento		HORIMETRO	PRECISION	CONSUMO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA							
16578		66	94.3	SI	<table border="1"> <tr> <th>Desconexión</th> <th>Pila</th> <th>"Flujo x F"</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>LO</td> </tr> </table>			Desconexión	Pila	"Flujo x F"	SI	SI	LO
Desconexión	Pila	"Flujo x F"											
SI	SI	LO											
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Genera Alarma	SI	SI						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	5. OBSERVACIONES								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI								
No.		Prueba / Simulación		Descripción			Resultado						
1		Estado Pila S.L.V		Verifica voltaje de la pila			Ver						
2		Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo			OK						
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo			OK						
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo			OK						
5		Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte			OK parte						
6		Otras:											
7		Otras:											
Descripción del diagnóstico identificado													
Código		DESCRIPCIÓN		CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
No.		Prueba / Simulación		Descripción			Resultado						
1		Flujo + 0 (Cierre Fajóvato)		Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)			LO						
2		Flujo Mismo		Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-L2-E2)			LO						
3		Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora			Bueno						
4		Desconexión tarjeta de flujo		Desconecta línea eléctrica			Bueno						
5		Activación de válvula de flujo		Obtener manguea de salida de aire de compresor			Bueno						
6		Otras:											
7		Otras:											
8		Otras:											
En Mantenimiento		HORIMETRO	PRECISION	CONSUMO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA							
16578		67	94.5	SI	<table border="1"> <tr> <th>Desconexión</th> <th>Pila</th> <th>"Flujo x F"</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>LO</td> </tr> </table>			Desconexión	Pila	"Flujo x F"	SI	SI	LO
Desconexión	Pila	"Flujo x F"											
SI	SI	LO											
FORMA MANTENIMIENTO		Firma del Técnico											
		Wilsom G.											