



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-4443-FM-009
Version: 2
Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27-07-23 Remisión #: 191541 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: MT-4811 D Fecha Inicio: 27-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 27-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Acople rosca a tubo humidifi 1					
BARRILLES ADICIONALES DADOS POR FACILITAR					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONECCIÓN			"FLUJO a 0"			REJILLAS	FILTROS	BARRIL	CÓDIGO DE BARRAS			
					(20-04)	(20-04)	(20-04)	(20-04)	(20-04)	(20-04)				(20-04)			(20-04)
	1990665	95-6	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	X	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Checklist manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONECCIÓN			"FLUJO a 0"			REJILLAS	FILTROS	BARRIL	CÓDIGO DE BARRAS			
					(20-04)	(20-04)	(20-04)	(20-04)	(20-04)	(20-04)				(20-04)			(20-04)
199	11	61	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Justo