



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-MAN-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 25/13/23 Remisión #: 182154 Auxiliar Mantenimiento: *Santiago Moreno* No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NN-718 B** Fecha Inicio: 25/13/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 25/13/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

Un Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
13264	6	943	5		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Generó Alarma:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE RESULTADO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Interno	1		Pila	1
	Switch	1			
	actopie	1			
	plástico	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Ciclo:		

Un Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
13266	3932	51			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado <i>Santiago Moreno</i>