



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 1

Fecha Emisión: 12/5/23 Revisión: 0 Autor: Santiago Martin

Código Equipo: NN-3875 Fecha Inicio: 12/5/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 12/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO

FALLA	BAND	CLASE DARG	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	III. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE MANTENIMIENTO	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0" (10-20)				BASE (20-40)	MANA (20-40)	(20-40)		
14917669533					SI	SI	ES	SI	SI	SI	21	31	21		MPO
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	Cual?	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	NO				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	NO	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	NO				
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otras		
7	Otras		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 2 (Cama Fugativa)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo (L1-L3-E2))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea electrónica	
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

PARAMETROS DE MANTENIMIENTO	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0" (10-20)				BASE (20-40)	MANA (20-40)	(20-40)		
14917669533					SI	SI	ES	SI	SI	SI	21	31	21		APedraza

FIRMA MANTENIMIENTO: