



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: SACABM-FR-03  
 Versión: 2  
 Fecha Actualización: 11/03/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **14-11-23** Revisión a:  Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden:

Código Equip: **NN-231B** Fecha Inici:  Hora Inici Labor:  Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO:  FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DISPOSICION	CANTIDAD	SI REPORTA	REPUESTO	CANTIDAD
			<b>FILTRO CENTRAL DESGASTE</b>	<b>7</b>			

OTRAS ALERGIAS O DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUELDAS	OBSERVACIONES						
					Desconexión		Pila	"Flujo a P"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MANOS			MANOS	MANOS				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)				
	<b>2036165</b>		<b>94.0</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>							
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó alarma		No														
2. RUIDO EXTRAÑO					3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas													
4. SISTEMA DE REFRIGERACION															Bueno						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																					
7. CONTROL DE TEMPERATURA															Buena						
8. Con Sobrecalentamiento																					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	<b>SI</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<b>SI</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>SI</b>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<b>SI</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	<b>SI</b>
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo "0" (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L1 - E5)	<b>SI</b>
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E3)	<b>SI</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>SI</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	<b>SI</b>
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	<b>SI</b>
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUELDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila	"Flujo a P"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MANOS			MANOS	MANOS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)
	<b>20363</b>	<b>63</b>	<b>94.2</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>FIRMA MANTENIMIENTO</b>		