



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Version: 2
Fecha Actualización: 11/02/2016
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 10-1-24
Revisión a:
Auxiliar Mantenimiento: JONIER ABUDICO
No. Orden:

Codigo Equipo: NW-4120B
Fecha Inicio:
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PROTECTOR DISPLAY	DESUASTE				
ACOPLE ROSCA	ATUBO HUMIFICADOR				

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga	"Flujo a 0"	BUZILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS
					(P1)	(P2)	(P3)						(B1)	(B2)		
3270	6.6	94.7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	Si	Cual?		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS de SICIOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	5'
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5'
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	5'
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5'
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	5'
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TARJETA PRINCIPAL	1		FILTRO ITALIANO de AIRE	1
	Kit TAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Neumática)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - O3)	5'
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y L1-L2-O3)	5'
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	5'
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactiva flujo eléctrico	5'
5	Activación de válvula de flujo	Operar manguera de salida de aire de compresor	5'
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga	"Flujo a 0"	BUZILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS
					(P1)	(P2)	(P3)						(B1)	(B2)		
3273	65	94.6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	FIRMA MANTENIMIENTO