



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 14-06-24 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ADJERIO** No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NN 761B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: _____ FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUES TO CARGADO
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	6663	6'S	95'S	5'	5'	5'	ES	5'	5'	5'	5' 5'	5'		
1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	Si	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno OK Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK Con Sobrecalentamiento OK														

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5'
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5'
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	5'
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5'
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	5'
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	5'
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	5'
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	5'
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea ulétrica	5'
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	5'
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	6668	6'S	95'S	5'	5'	5'	ES	5'	5'	5'	5' 5'	5'		
FIRMA MANTENIMIENTO														